Istruzioni per l'uso

Legga attentamente questo foglio perché la aiuterà ad usare correttamente HYLO FRESH®.

HYLO FRESH®

Sodio ialuronato 0,3 mg/ml

Per dare sollievo agli occhi irritati

Collirio sterile, senza fosfati e senza conservanti

Che cos'è HYLO FRESH®?

HYLO FRESH® è una soluzione sterile priva di conservanti per uso oftalmico.

Composizione:

1 ml HYLO FRESH® contiene 0,3 mg/ml di ialuronato di sodio, tintura madre di eufrasia, acido borico, borace e acqua per preparazioni iniettabili.

A che cosa serve HYLO FRESH®?

Per dare sollievo agli occhi irritati.

Quando si dovrebbe utilizzare HYLO FRESH®?

HYLO FRESH® viene utilizzato per dare sollievo agli occhi irritati. Gli occhi possono diventare irritati e secchi a causa di fattori ambientali come lavoro prolungato al computer, clima secco, correnti d'aria, aumento della radiazione solare, contaminazione dell'aria con polvere o pollini o quando si indossano lenti a contatto. Già da secoli, preparati a base di eufrasia (Euphrasia officinalis), venivano tradizionalmente utilizzati per curare irritazioni alla congiuntiva accompagnate da arrossamento e bruciore agli occhi, aumento della lacrimazione, gonfiore e arrossamento delle palpebre o del margine palpebrale. HYLO FRESH® contiene inoltre ialuronato di sodio. Lo ialuronato di sodio aumenta la viscosità della soluzione umidificante, rendendola così più densa dell'acqua. In questo modo permane più a lungo sulla superficie oculare. L'utilizzo delle gocce oculari dà sollievo agli occhi e alle palpebre irritati che, grazie ad esse, ricevono un'idratazione simile a quella fornita dalle lacrime.

HYLO FRESH elimina tutti i sintomi provocati dalla secchezza oculare, ad esempio a causa di una scarsa produzione fisiologica di lacrime naturali. L'umidificazione analoga a quella delle lacrime fornita da HYLO FRESH® serve a migliorare l'idratazione oculare anche quando si indossano lenti a contatto morbide o rigide.

Grazie all'assenza di conservanti, HYLO FRESH® è ottimamente tollerato. HYLO FRESH®, inoltre, non contiene fosfati, il che permette di evitare possibili complicazioni dovute alla formazione di depositi sulla cornea.

Come usare HYLO FRESH®?



Figura 1

Rimuovere il tappo prima dell'uso.

Per rimuovere il tappo, tenerlo fermo con una mano e con l'altra, ruotare il flacone portandolo verso il basso. Prima della prima applicazione, capovolgere il flacone con il contagocce verso il basso e premere sul fondo del flacone per far uscire la prima goccia dal contagocce. Il flacone ora è pronto all'uso per le successive applicazioni.



Figura 2

Mantenere il flacone capovolto posizionando il pollice sulla parte superiore del flacone e le altre dita sul fondo dello stesso.

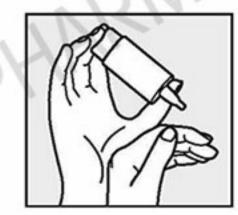


Figura 3

Sostenere con la mano libera, la mano che regge il flacone.



Figura 4

Piegare leggermente la testa all'indietro, premere rapidamente ed energicamente sul fondo del flacone. Si aziona così il meccanismo per il rilascio di <u>UNA</u> goccia. Grazie allo speciale meccanismo di valvole del Sistema COMOD®, le dimensioni e la velocità di fuoriuscita di una goccia sono sempre le stesse, indipendentemente dalla pressione applicata.

Chiudere lentamente gli occhi per permettere al fluido di diffondersi sulla superficie dell'occhio.

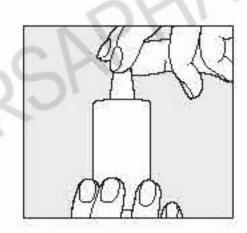


Figura 5

Dopo l'uso, richiudere immediatamente il flacone con il tappo, assicurandosi che non vi siano residui di liquido sul contagocce. Durante l'instillazione evitare ogni contatto tra il contagocce del flacone con l'occhio o con la pelle del viso.

Il sistema COMOD[®] in commercio rilascia 10 ml di soluzione equivalenti a circa 300 gocce.

Per ragioni tecniche, una piccola quantità di soluzione rimane sempre nel flacone al termine dell'uso.

È opportuno che il flacone di HYLO FRESH® sia destinato al trattamento di una sola persona.

Che cosa altro bisogna sapere?

Se si usa un qualsiasi altro collirio, attendere almeno 30 minuti tra le applicazioni e usare sempre HYLO FRESH[®] per ultimo.

Gli unguenti oftalmici, tuttavia, dovrebbero essere sempre applicati dopo HYLO FRESH®.

Poiché le gocce oculari HYLO FRESH® non contengono conservanti, un trattamento di lunga durata è particolarmente ben tollerato. Sono state osservate in rarissimi casi reazioni di ipersensibilità (bruciore, lacrimazione), che tuttavia scompaiono immediatamente interrompendo la somministrazione di HYLO FRESH®.

Dopo l'utilizzo di lenti a contatto in combinazione con l'applicazione di gocce oculari raccomandiamo di attendere 30 minuti circa al fine di evitare possibili reazioni di intolleranza che potrebbero essere causate da interazioni tra i detergenti per lenti a contatto e HYLO FRESH[®].

HYLO FRESH® può essere utilizzato in età pediatrica, in gravidanza e durante l'allattamento.

Con quale frequenza e per quanto tempo si può usare HYLO FRESH®?

Usare HYLO FRESH® a seconda dei propri disturbi e attenendosi alle istruzioni del medico o del farmacista. Generalmente, si instilla in ogni occhio una goccia di HYLO FRESH® tre volte al giorno. Se necessario, è consentito anche un uso più frequente.

In caso di un uso più frequente di HYLO FRESH® (ad es. più di 10 volte al giorno), consultare un oculista. HYLO FRESH® è indicato per un trattamento a lungo termine. Come per tutti i disturbi, è opportuno consultare un oculista se i disturbi persistono.

Quando non usare HYLO FRESH®?

Non usare HYLO FRESH® in caso di ipersensibilità accertata ad uno dei componenti.

Come conservare HYLO FRESH®?

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C (♣ 25°C).

HYLO FRESH® può essere utilizzato per 6 mesi dopo l'apertura.

Non usare dopo la data di scadenza (≌).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Sono disponibili le seguenti confezioni:

Collirio da 10 ml

Stato attuale delle informazioni:

Ottobre 2018

Fabbricante ():

URSAPHARM Arzneimittel GmbH Industriestraße 66129 Saarbrücken, Germania www.ursapharm.de

Distributore:

URSAPHARM S.r.l. Via Vittor Pisani 16 20124 Milano - Italia Tel.: +39 02 94 75 21 25 E-mail: info@ursapharm.it





Dispositivo medico

